

Comfizz Ostomy Waistband with Silicone 18 cm Sort

Comfizz Ostomy Waistband er et mykt og elastisk belte i sømløst strikket materiale som gir mild kompresjon og støtte. Beltet er godkjent for refusjon hos Helfo. Stomiopererte kan bestille beltet på blå resept 505, fra 1. april 2025.

Hvorfor bruke Comfizz Ostomy Waistband?

Comfizz Ostomy Waistband bidrar til trygghet og komfort i hverdagen med stomi. Det gir behagelig og sikker fiksering av stomibandasjen. Beltet holder på plass posen, støtter utstyret, samt "glatter" ut under klærne.

Fordeler

- Enkel å bruke
- Synes ikke under klærne
- Mykt og pustende materiale
- Silikonlinning oppe og nede forhindrer at beltet "ruller"
- Kan brukes dag og natt
- Velegnet under intimitet
- Trygghet under fysisk aktivitet
- Forhindrer irritasjon fra buksekanter og belter
- Reduserer følelsen av "drag" i en full stomipose
- Kan brukes brokkforebyggende i kombinasjon med Comfizz truse og boxer.



*Comfizz Ostomy
Waistband kan
benyttes til fiksering
Comfishield
Stomibeskyttelse*

Slik bruker du Comfizz Ostomy Waistband

Beltet tas på som en underbukse. Trekk beltet opp til midjen og plasser beltet over stomibandasjen. Beltet kan bæres over og under vanlig undertøy. Passer til stomi på høyre og venstre side. Beltet er ca. 18 cm høyt.

Helfo vnr.

836415	Comfizz Ostomy Waistband with Silicone 18 cm Sort	S/M	71-81 cm
814906	Comfizz Ostomy Waistband with Silicone 18 cm Sort	M/L	86-96 cm
841739	Comfizz Ostomy Waistband with Silicone 18 cm Sort	L/XL	101-111 cm

Størrelsene er basert på midjemål. Mål midjen og over stomien. Ved et brokk tas mål liggende når brokket er helt avslappet. Størrelsene kan overlappe.